

# SAMO(体温センサー)利用マニュアル

Version 1.0



目次

<b>1. Wi-Fi接続せずに使用する .....</b>	<b>3</b>
<b>2. セットアップの前に .....</b>	<b>4</b>
ユーザー様にご用意いただくもの .....	4
Wi-Fiルーターの設定を確認 .....	4
アプリをインストール .....	5
アカウントを登録 .....	6
<b>3. デバイスを追加する .....</b>	<b>7</b>
<b>4. アプリ画面について .....</b>	<b>9</b>

## 1. Wi-Fi接続せずに使用する

本製品はWi-Fi接続せずともご利用が可能です。

設置について、前額部の上部に40～70cm離してセンサー部分がくるように設置し、非接触型で寝ながらリアルタイムに体温測定します。

本体の中央部にある液晶に測定した体温が表示され、本体単体での体温測定が可能です。



- センサー : 体温を測定
- LEDライト : 測定位置を確認
- OLEDパネル : 体温表示
- 初期化ボタン : Wi-Fi設定初期化
- 固定ネジ : 本体を固定
- 電源 : USBアダプタ式電源

## 2. セットアップの前に

本製品をWi-Fi接続する場合は、以下よりご参照ください。

### ユーザー様にご用意いただくもの

- 常時接続できるWi-Fi環境（2.4GHz帯）
- スマートフォン（パソコンではご使用いただけません）

### Wi-Fiルーターの設定を確認

以下の設定項目をご確認ください。

項目	設定	備考
2.4GHz帯	有効	セットアップ時のみ2.4GHzにする必要があります
パスワード（暗号化キー）	半角英数字のみ使用	32桁以上は対応していません
認証方式	WPA/WPA2	WEPには対応していません
MACアドレスフィルタリング	無効	
IPアドレス	自動割り当て	
プライバシーセパレータ	無効	※を確認ください

#### ※プライバシーセパレータについて

ルーターのメーカーや機種により、[AP隔離] [SSIDセパレータ] [APアイソレーション] [ネットワーク分離]と表示の場合もあります。

有効になると、ルーターを介してスマホと本製品と通信できないため、無効にする必要があります。

#### ※モバイルルーターをお使いの場合

Wi-Fi暗号化強化（PMF）という項目がONになっている場合は、OFFにご変更ください。

## アプリをインストール

以下のバナーを選択するか、QRコードを読み込むか、ストアにて「Home+」と検索し「Home+（ホームプラス）」アプリ（無料）をインストールしてください。

【iOS】




【Android】




- ※iOS8.0、Android4.4以上をサポートしています。
- ※位置情報など権限を求められましたらONにしてください。

## アカウントを登録

アプリを起動し、以下の手順よりアカウント登録を行ってください。

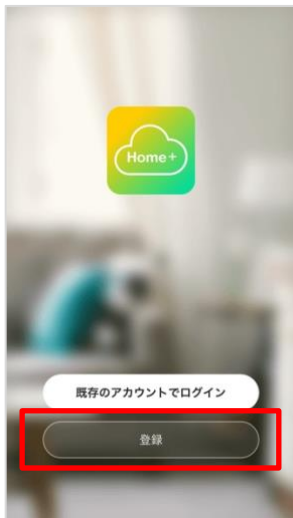

アプリを起動し「登録」をタップします。

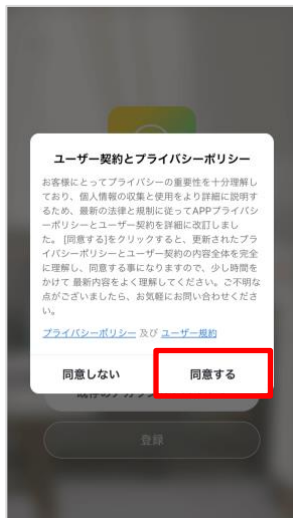

プライバシーポリシーとユーザー規約をご確認のうえ「同意する」をタップします。



「Japan」が選択されていることを確認して、メールアドレスを入力し、「紹介コードの取得」をタップします。




メールアドレスに届いた認証コードを入力します。

※届かない場合は、迷惑メールフォルダに入っていないか確認してください。



任意のパスワード（6桁以上）を入力します。

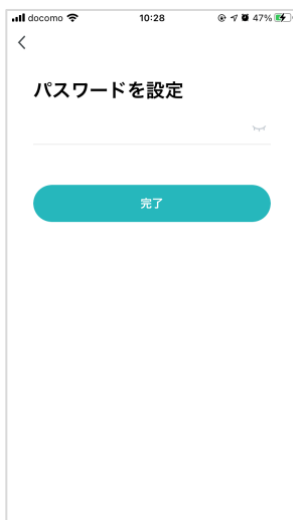

「完了」をタップします。



トップ画面が表示されましたら、アカウント登録は完了です。

### 3. デバイスを追加する

スマートフォンを部屋のWi-Fi（2.4GHz帯）に接続してデバイスの追加を行ってください。

※5GHz帯は機器のセットアップができません。



マイホームの「デバイスの追加」もしくは「+」をタップします。



「その他」の「その他 (Wi-Fi)」を選択します。



Wi-Fiが2.4GHzが表示されていることを確認して、Wi-Fiパスワードを入力します。

「次へ」をタップする前に以下の画像を参照してください。



デバイス本体ボタンを10秒以上長押し、OLEDパネルに「Wi-Fi Pairing」が表示されてからアプリ画面の「次へ」をタップします。



上記の画面が表示されたらそのまま「点滅を確認できたなら、次へ」をタップして、「次へ」をタップします。



デバイスの追加中です。




追加成功と表示されたらお好みで名称を変更して、「完了」をタップして追加完了です。



## 4. アプリ画面について

ここをタッチして以下の操作ができます。

- ・デバイス名編集
- ・部屋変更
- ・デバイス削除

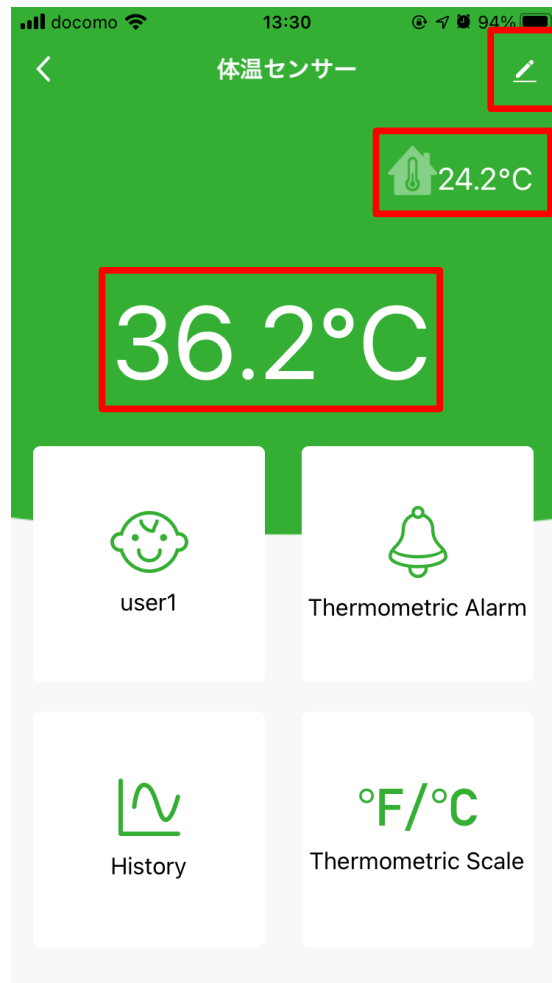

室温

### 【体温】

0.1℃の変化ごとに数値が変わります。

### 【ユーザー登録】

3名まで登録できます

### 【履歴グラフ】

### 【体温アラート設定】

アラートが通知する体温を設定できます。

### 【温度単位の切替】